

使用說明書/保固書

KSLM09

段式把手
高度調節
(單鍵式)

腳煞車

煞車把
手煞車

三段式
調節輪

把手
折疊式

拐杖架

反光
設計

購物籃
置架

時尚購物助步車

包袋橫放・
上部可放商店購物
籃。也可當做座椅。

※押し手を後方から見た図

拡大図

押し手高さ調節ボタン

上 中 下

前輪を上から見た図

直進固定 回転角度90度 回転角度360度

【駐車ブレーキを使う場合】

駐車ブレーキレバーを上げる

駐車ブレーキレバーを下げる

【ストッパーを使う場合】

ストッパーをあげる

ストッパーを下げる

有保冷効果の
包袋内側。

衛部醫器陸輸壹字第003375號

鋁件
抗腐蝕
處理

最大
積載荷重
5kg

最大使用者
體重
80
kg

シルバーカー

折疊時

型號	KSLM09		顏色	棕色
J A N	4938765010476		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●向上拉起車身側邊迴轉桿，即可將包袋下拉變成座位。 ●下押手把兩邊調節鈕，即可調節高度。 ●前輪處有車輪調節扳扣，可三段式調節。 ●煞車功能，含手煞車、腳踩煞車及側邊煞車。 		材質	本體：鋁合金 座面・袋：尼龍・聚酯
組裝尺寸	寬460 x 長530 x 高800~920mm		生產國	中國
折疊尺寸	寬460 x 長320 x 高845mm		本體附屬品	-
座面尺寸	寬285 x 長240 x 座面高430mm		可選配件	-
袋尺寸	寬285 x 長160 x 高430mm		使用對象者	自己可步行者
前輪直徑	150mm	後輪直徑	150mm	<ul style="list-style-type: none"> ●請小心下坡，有溝・段差・砂・泥・水的地方。 ●坐在座位上時，必須剎車，並確認左右後輪已經固定。 ●有人坐著時，請勿由後往前推。
重量	約5kg		注意事項	
袋容量	約15L ※按包袋的尺寸計算		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
內箱尺寸	寬480 x 長340 x 高855mm	商品箱入數	1台	
外箱尺寸	-	外箱入數	-	