

使用說明書

KHKS01

輕巧側邊四腳扶手



折疊時




使用時


最大使用者
體重
100
kg

衛部醫器陸輸壹字第003439號

可豎立，不占空間，

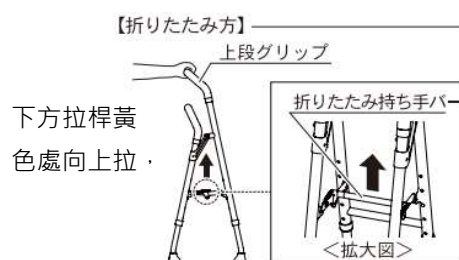

四支腳皆有
卡榫，向內

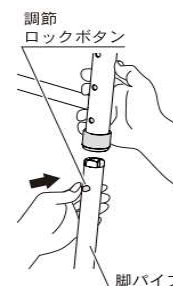

品番	KHKS01			購買日期	年 月 日
顏色	銀色				
JAN	4938765 005021			生產國	中國
組裝尺寸	寬225×長270~335×高700~850mm		使用對象者	可自行步行的人士	
折疊尺寸	寬225×長165×高730mm		注意事項	●請必須遵守最大使用者體重。 ●請檢查每一個部件，確認有無變形、裂紋和損壞。 ●步行時，請抓住上段握把，以免夾傷手指。	
拐杖手柄高度	上段 700~850mm 5段	下段 560~710mm 5段		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
重量	1.3kg				
內箱尺寸	230×110×620mm	內箱的裝入數	1只		
材質	主體：鋁合金 手柄：聚氨酯 腳墊：天然橡膠				

