

# 使用說明書

**KSC01**




## 大洗澡椅



SC01

鋁件  
抗腐蝕  
處理

最大使用者  
體重  
**100**  
kg

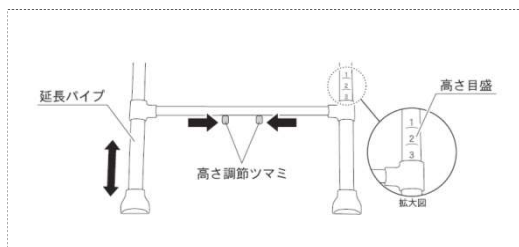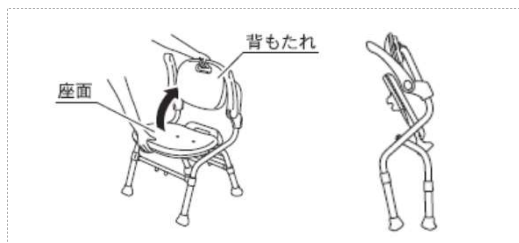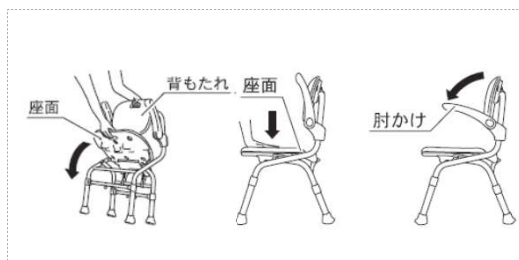

型號	KSC01		顏色	藍色
JAN	49387655330097		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請一手握住座椅背部，一手握住座面並往下壓。接著把雙手放在座面上往下壓，讓座椅確實展開，再將兩側扶手放下。</li> <li>●一手握住椅背，一手握住座面，同時向內推便可收合。</li> <li>●座椅高度有五段式調節。同時壓下椅腳內側的高度調節器，椅腳便可上下移動。</li> <li>●調整到適合的高度後，放開高度調整器固定座面（前後腳的高度須一致）。</li> </ul>	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●調整高度時，兩側請調整至一樣的高度，才可使用。</li> <li>●請在平坦的地面使用洗澡椅。</li> <li>●僅限洗澡時使用，請勿做其他用途。</li> </ul>	
展立尺寸	寬505×長490~560×高705~805mm	生產國	中國	
折疊尺寸	寬505×長260×高815mm	重量	5.8kg	
座面尺寸	寬480×長320mm	最大使用者體重	100kg	
座面高度	360~460mm · 5段調整	進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578	
材質	本體：鋁合金 座面·背靠：聚乙烯 軟墊：EVA樹脂 腳套：天然橡膠			