

# 使用說明書



KSC02

## 低背洗澡椅






SC02

鋁件  
抗腐蝕  
處理

最大使用者  
體重  
**100**  
kg



收折後

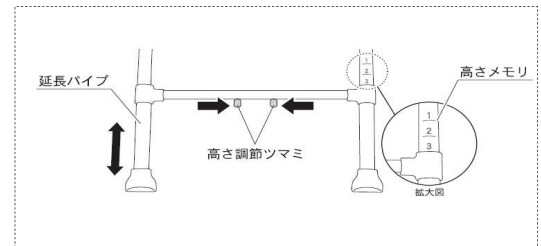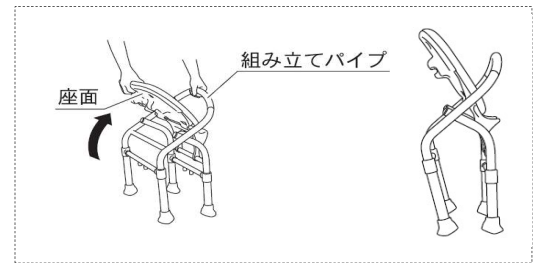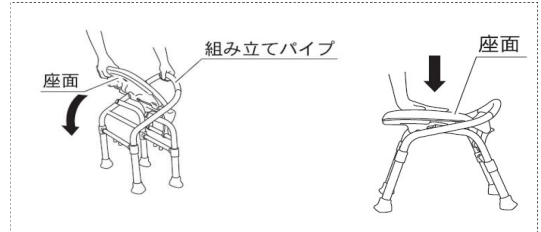

型號	KSC02		顏色	藍
J A N	4938765530103		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請如圖一手握住洗澡椅骨架，另一手將椅面依箭頭方向往下壓，即可打開洗澡椅，請從上方將椅面往下使其固定。</li> <li>●收折時請如圖一手握住洗澡椅骨架，另一手將椅面依箭頭方向向上拉起，收折後洗澡椅可自行站立。</li> <li>●洗澡椅可調整至5個不同的高度位置，若要調整高度，請使用骨架上的高度調節鈕，調整高度時，請留意兩側椅腳上的高度標記必須相同，最高為5。</li> </ul>		材質	本體：鋁合金 / 座面、背靠：聚丙烯 軟墊：EVA / 腳套：天然橡膠
站立尺寸	寬505×長490-560×高410-510mm		生產國	中國
折疊尺寸	寬505×長260×高635mm		注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●調整高度時，兩側請調整至一樣的高度，才可使用。</li> <li>●請在平坦的地面使用洗澡椅。</li> <li>●僅限洗澡時使用，請勿做其他用途。</li> </ul>
座面尺寸	寬480×長320 mm			
座面高度	360-460mm，5段調整		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
最大使用者體重	100kg	重量		