

使用說明書

KSICP01

輕巧型助步車

段式把手
高度調節
(單鍵式)

框架
折疊式

腳煞車

反光
設計

前進
固定

時尚配色



花漾粉

柔軟坐墊



花漾黑



折疊時




衛部醫器陸輸壹字第003375號



鋁件
抗腐蝕
處理

最大
積載荷重
1.5kg

最大使用者
體重
80
kg

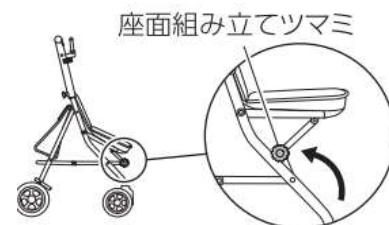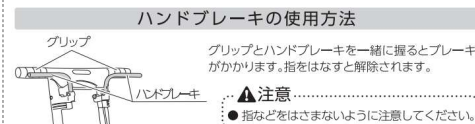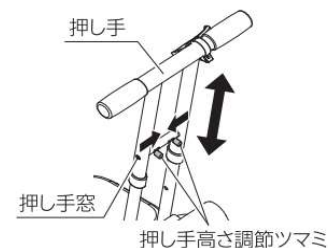

品番	KSICP01-PK(花漾粉)・KSICP01-BK(花漾黑) (請圈選您購買品項)			顔色	花漾粉・花漾黑	
JAN	4938765 005410 (花漾粉)・4938765 005427 (花漾黑)			購買日期	年 月 日	
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 手把下方鈕蓋向內夾，即可調節高度。 ● 煞車功能，含手煞車、及腳踩煞車。 ● 座椅下方突起處向內押，即可固定座椅。 			材質	本體：鋁材 座面・袋：聚酯	
組裝尺寸	寬度415×長度495×高度765～905mm			生產國	中國	
折疊尺寸	寬度415×長度215×高度825mm			本體附屬品	-	
座面尺寸	寬度250×長度175×座面高度435mm			可選配件	-	
袋尺寸	寬度230×長度205×高度255mm			使用對象者	自己可步行者	
前輪尺寸	122mm	後輪尺寸	122mm	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 必須遵守使用者最大乘載體重限制。 ● 離開車體時，必須剎車。 ● 非輪椅，禁止載人行走。 	
重量	2.95kg(不含袋子)					
袋容量	約12L ※依照袋子的尺寸計算			進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578	
內箱尺寸	寬度420×長度230×高度840mm	商品箱入數	1台			
外箱尺寸	-	外箱入數	-			