

使用說明書

KSIMD01

無段式
把手
高度調整

腳煞車

三段式
調節輪

把手
折疊式

反光
設計

拐杖架

中型助步車



粉紅花

衛部醫器陸輸壹字第003375號



鋁件
抗腐蝕
處理

最大
積載荷重
7kg

最大使用者
體重
**80
kg**



摺疊時

柔軟座面設計

久坐臀部也不痛！



大容量收納

寬敞大容量，買再多也裝得下。



粉色系框架、車輪

各式包款都好搭

色彩明亮
有朝氣！



型號	KSIMD01-PK(粉紅花) · KSIMD01-BK(花漾黑)			顏色	粉紅花 · 花漾黑
JAN	4938765 005496 (粉紅花) · 4938765 005502 (黑)			購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●鬆開左右側把手調節鈕即可調整手把高度。 ●含手煞車可煞車，腳煞車可固定後輪。 ●前輪處有車輪轉向調節鈕，可三段式調節。 			材質	本體：鋁材 座面·袋：聚酯
組裝尺寸	寬470 x 長515 x 高835 ~ 880mm			生產國	中国
折疊尺寸	寬470 x 長470 x 高620mm			本體附屬品	-
座面尺寸	寬260 x 長240 x 座面高460mm			可選配件	-
袋尺寸	寬230 x 長330 x 高220mm			使用對象者	自己可步行者
前輪直徑	150mm	後輪直徑	150mm	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> · 請遵守最大使用者體重限制。 · 當坐在座位時，請務必煞車，確認左右後輪是否固定。 · 當坐在座位時，請勿推動車體。
重量	4.8kg				
袋容量	約13L				
內箱尺寸	寬480 x 長390 x 高610mm	內箱入數	1台		