

使用說明書

KYD02-16

浴缸內用泡澡椅 (中)



KYD02-16
藍色

最大使用者
體重
100
kg


使用方法



進出浴缸時，可當作踏板。



可放置浴缸中當座椅。

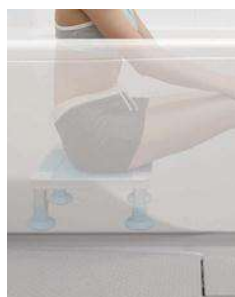

示意圖

側立擺放省空間

不須靠在牆壁上即可
側立，不佔空間。



清潔好方便

椅板跟椅墊都可拆下
清潔。

椅板



椅墊



高度調節一次搞定

椅腳為橢圓形設計，前
後一次對準調整高度。



型號	KYD02-16			顏色	藍色
JAN	4938765 611031			購買日期	年 月 日
站立尺寸	KYD02-16：寬400×長300×高160·175·190·205mm		材質	椅管：鋁 軟墊：天然橡膠 椅板：聚丙烯 椅腳橡膠：天然橡膠	
座面尺寸	寬390×長290mm		生產國	中國	
重量	2.5kg		使用對象者	-	
內箱尺寸	寬405×長305×高190mm	入數	1台	注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●請務必了解使用者的狀態，再使用本產品。 ●請務必遵守最大使用者體重限制。 ●請勿以熱水澆淋本產品。