


感謝您購買本公司的產品。為了能夠安全使用本產品，在使用前請務必詳細閱讀此操作說明書。此外，閱讀完後請妥善保管。

如果使用上對本產品有不清楚的地方，請直接聯繫購買商家或是本公司客服部。

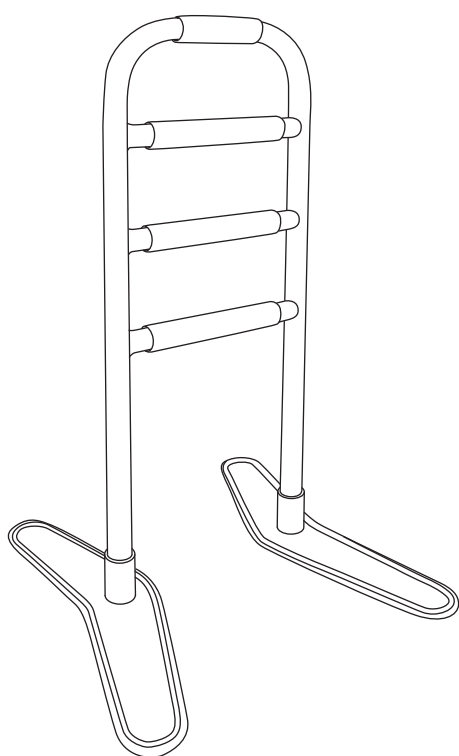

目 錄

使用前注意事項	1 P
使用上注意事項	2~3P
產品清潔方式	3 P
各部位名稱及產品規格	4 P
產品組裝方式	4P
正確使用方法	5P
設置方式	5P
使用方法	6~9P

若發現產品有破損或異常的情況，請立即停止使用，並與購買店家或本公司客服部聯繫。若繼續使用的話，可能會造成危險。

將本產品轉讓給他人時，請務必連同本說明書一起。

福祉用具綜合廠家

 **株式会社 幸和製作所**

製造商名稱: 幸和製作所株式會社

製造商地址: 日本大阪府堺市區海山町3丁159番地 1

總代理  **杏豐實業股份有限公司**
SUN•UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw

新北市三重區重新路五段609巷10號4樓
電話: (02)6635-8858

使用前注意事項

為了防止摔落及意外的發生，請務必遵守下列事項。



警告

錯誤的使用方式，可能會造成死亡或受傷的可能，請務必遵守下列事項。

- 請於平坦安穩的地方使用本產品。若有高地差或凹凸不平的地方使用，會有跌倒及受傷的可能。
- 請檢查產品各部分，是否有損傷、變形、龜裂或是破損等異常，並確認產品已確實設置。
- 依使用者的身心狀態及使用環境，部分身體可能會落入扶手空隙。在不同使用場所下，有造成生命危險的可能。
- 若行動無法掌握者(患有失智症等)或是無法以自身力量迴避危險狀況者，請勿使用本產品。
※重度患者(照護程度4・5)，請在旁人監看下、充分試用後再使用。
若使用時有任何不適，請立即停止使用，並與購買店家、醫生、護士或介護人員等專家討論。
- 調整產品各部份時，請確實執行。並注意不要夾傷手指。
- 底座有分內側和外側。請確認後正確組裝。



注意

錯誤的使用方式，可能會造成使用者受傷或物品損壞，請務必遵守下列事項。

- 本產品之功能是用於輔助使用者站起。使用時，請務必與專家討論(輔具專門人員、介護專家、職能治療師、物理治療師)。另外，請勿將本產品作為其他用途使用。
- 組裝本產品時，請務必確認周圍沒有人。
- 請確實組裝、調整本產品。並注意不要夾傷手指。
- 請確實將各部位的螺絲鎖緊，並確認產品有無破損或脫落。
- 請勿將產品放置於靠近火源的地方。可能會造成變形或故障。
- 請勿於戶外、陽光直射的地方使用本產品。產品可能會劣化或變色。
- 請勿於浴室等濕氣多的場所使用本產品，會有變質及發霉的可能。
- 請注意部份身體不要被扶手的空隙夾傷。
- 依照地板的材質、表面加工的不同，產品的椅腳橡膠可能會附著於地板、或是有染色、變色的情形，請特別注意。

使用注意事項



警告

錯誤的使用方法可能會導致使用者受傷或死亡，請務必遵守下列事項。

- 請依據使用者身體狀況的變化，與購買店家或是介護人員等專家討論，增添介護者協助幫忙。
- 請勿將手腳放入扶手間的空隙。會有造成窒息及骨折的可能。
- 請勿施加水平方向的力氣。可能會有跌倒及受傷的危險。請握住扶手，施加往地面方向的力氣。
- 請勿施加將扶手拔出方向的力氣。
- 請勿乘坐或懸吊本產品。可能會造成產品破損或使用者跌倒受傷。
- 若手腳或鞋底濕滑時，請勿使用本產品。可能會造成滑倒受傷。
- 扶手濕滑時，請勿使用。可能會造成滑倒受傷。請以乾布擦拭後再使用。
- 請勿將產品任意改造，或用於輔助站起以外的用途。可能會造成破損或故障。
- 若將產品放置於床鋪旁，請盡可能不要留空隙。若有空隙，頭或手腳可能會不慎夾傷。
- 若將產品設置於摺疊床，請務必將床的摺疊處鎖緊後再使用。
- 若將產品設置於有輪子的床，請務必將輪子固定後再使用。
- 若將產品設置於電動床使用，請務必詳閱電動床的使用說明書。有些特殊寢台等，無法使用本產品。
- 若將產品設置於電動床使用，不慎將頭及手腳放入扶手操作的話，可能會夾傷，造成生命危險，請特別注意。
- 請勿使用輪椅等會移動的物品來協助站起。可能會造成使用者跌倒。
- 若於電動床使用，請將產品設置在不會夾傷使用者身體的安全距離後再使用。並且留意產品擺放位置，避免不慎觸碰到電動床的開關。
- 由於本產品並非固定式，安裝後請務必確認使用者的狀況及產品是否安穩後再使用。若無固定好，可能會造成摔倒等事故發生。
- 若發現產品有異常，請立即停止使用。
- 若產品無法正確設置、或有功能損壞等情況，請立即停止使用本產品，並與購買店家或本公司的客服部聯繫。
- 請務必遵守最大使用者限重。
- 請勿讓本公司以外的售後服務人員進行產品的分解及修理。

使用注意事項



注意






錯誤的使用方式可能會造成使用者受傷或物品毀損，請務必遵守下列事項。

- 產品各部位的調整，請與購買店家或介護人員等專家討論。
- 本產品僅供1人使用。請勿2人以上同時使用。
- 移動產品本體時，請勿直接拖拉。可能會刮傷地板或是塌塌米。
- 請確認床架下方是否有20mm以上的空隙。若沒有20mm以上的空隙，無法將底座放入床下。
- 請小心不要被產品底座與地板的高低差絆倒。
- 請介護者特別確認使用者的狀態(是否能夠安全使用)。若使用者的健康狀態或身體情形有變化，請與購買店家或醫師、介護人員等專家討論。
- 使用時，建議讓介護人員在旁協助陪同。若使用者狀況不佳，請立即停止使用。
- 在容易滑倒的地板(如地毯等)使用本產品時，請特別注意。
- 產品放置於室內環境時，鐵製部分若有結露的情形發生，請用乾布等擦拭後再使用。
- 請勿將本公司與其他公司的產品進行組裝。可能會造成產品破損和受傷。
- 請勿將使用的床與安裝後的側邊支架、介護欄等組裝使用。頭、手、腳可能會夾在空隙，造成意外事故發生。

產品清潔方式

- 僅能使用中性洗劑進行產品清潔。
- 請用軟布或海綿沾取中性洗劑再擦拭。
- 請勿用板刷、或添有研磨劑的海綿、研磨粉等進行清潔。
- 絕對禁止使用漂白劑、汽油、強力膠等清潔產品。可能會造成產品故障及意外發生。

各部位名稱與規格

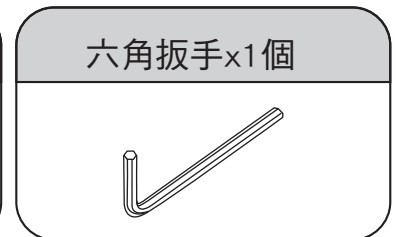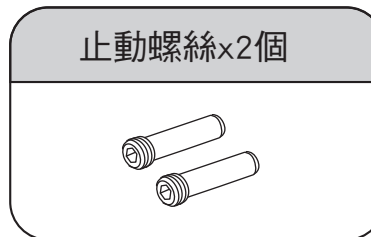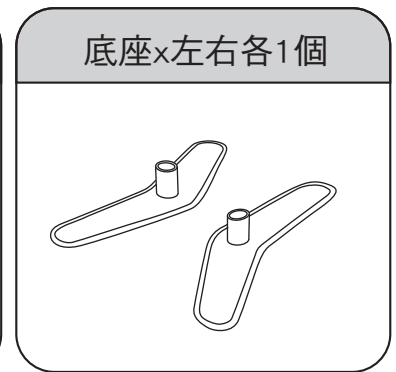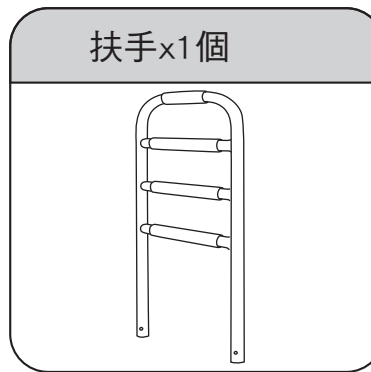
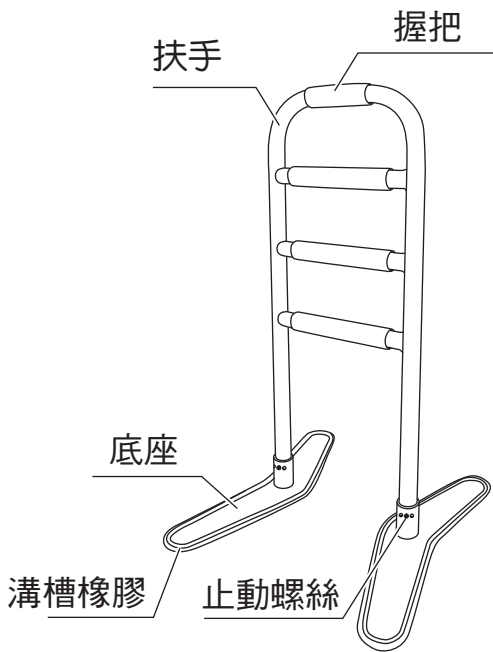


展立尺寸	寬470~690x深385~470x高800mm	重量	5.2kg
		最大使用者限重	100kg
材質	扶手：鋼	底座：鋼	
	握把：CR	溝槽橡膠：合成橡膠	止動螺絲：不鏽鋼

產品組裝方式

- 1** 請確認底座的內外方向是否放置正確，再將扶手裝上底座。


- 2** 用止動螺絲固定後，再用六角扳手控緊固定。
※請注意勿過度控緊

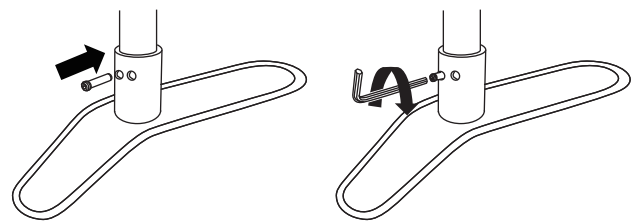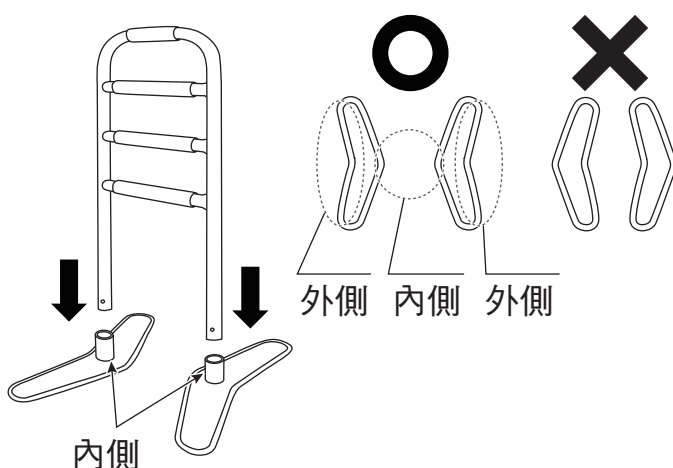

⚠ 注意


組裝後，請務必確認扶手及底座是否會搖晃、螺絲是否鬆動。若沒有控緊，可能會造成意外或受傷。

依照螺絲的固定位置，
能夠變更底座的方向。

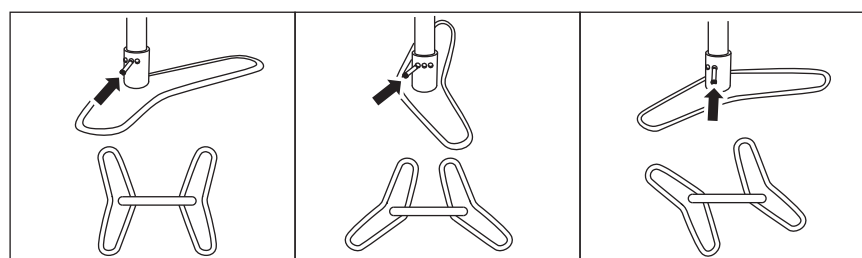


正確使用方式

- 若使用者無法自行維持身體安穩，請讓介護者在旁協助再使用。

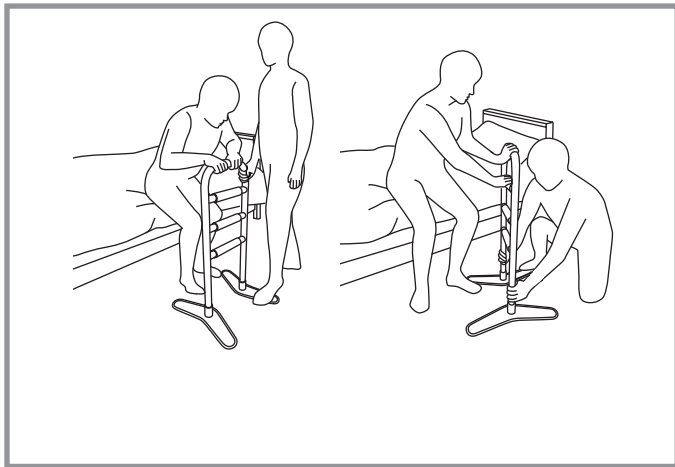


- 請對產品施予向下的力。

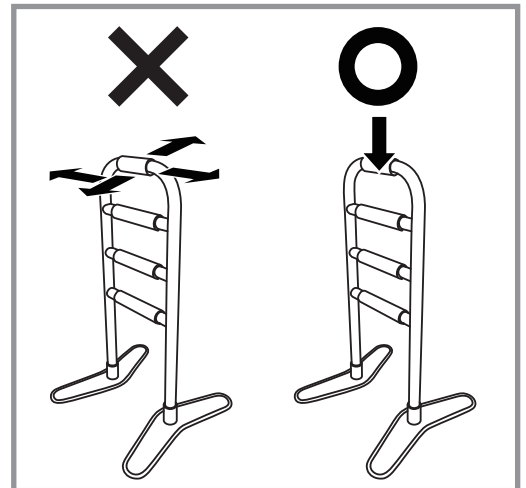


產品設置方法

- 相對床鋪的設置
設置位置示意圖

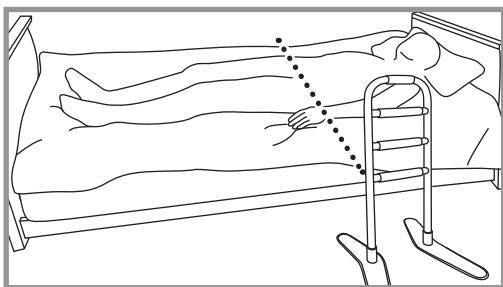

請將腰線與扶手端對齊設置。

- 相對棉被的設置
設置位置示意圖

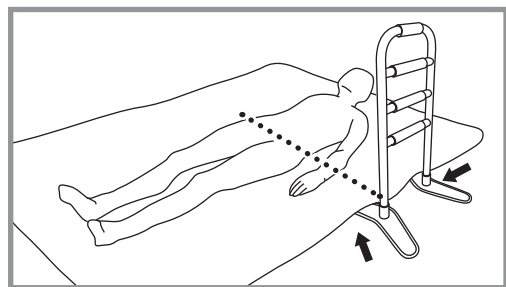


請將腰線與扶手端對齊設置。
並將底座塞入棉被底下。

- ⚠ **注意** ● 請勿讓扶手與床鋪間留有空隙。頭和手腳可能會被夾傷。

- 靠近牆壁使用的情況
廁所、玄關等有空間
限制的場所。



- 需要注意底座形狀的情況
客廳等，物品放置多的地方

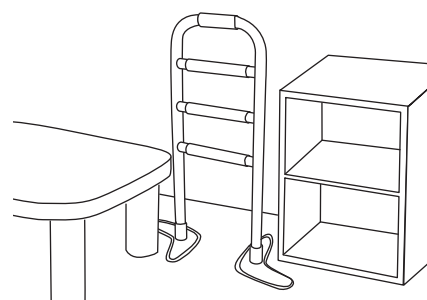


- ⚠ **注意** ● 請務必朝下方向施力。


使用方法

■從床上站起

1 將身體側躺

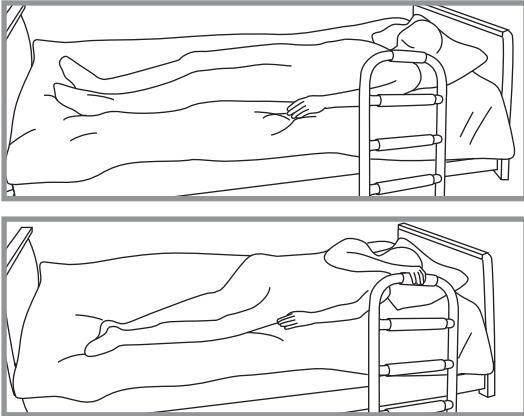


2 手撐住扶手，將上半身抬起。

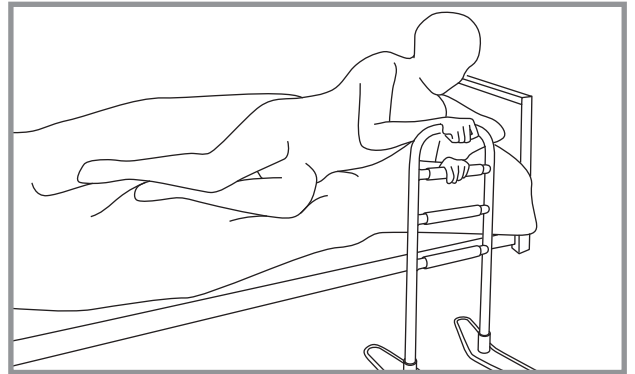

⚠ 注意 ●請務必朝下方向施力。


3 將雙腳放下地面，坐在床的邊緣。

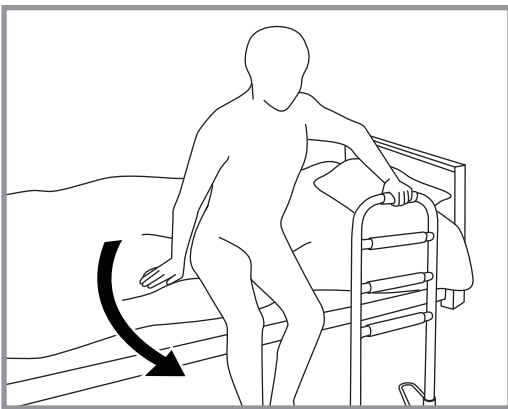

4 將扶手移動至容易站起的位置、方向。

(例)將扶手移動至容易站起的位置。

如正面朝向身體、側面、右邊或左邊。

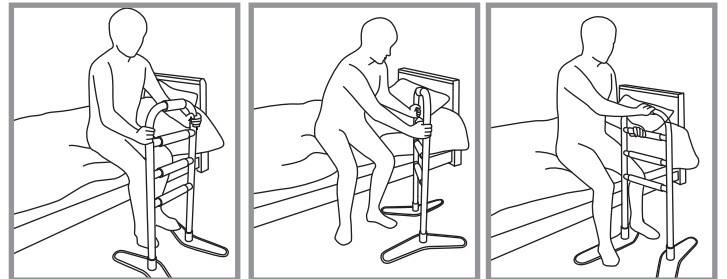


正面


側面

左或右邊

5 抓住握把，將上身稍微往前倒。

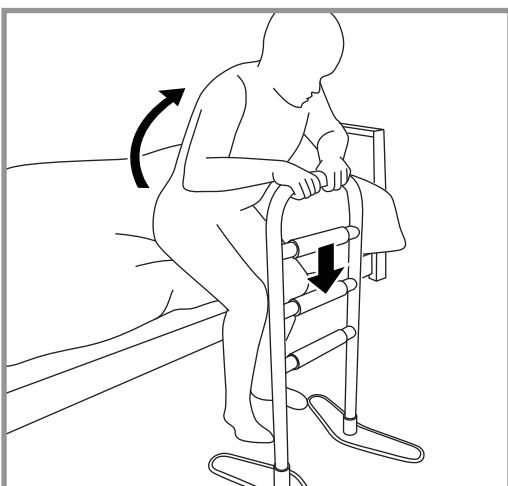

6 請一邊往下方向壓住扶手，一邊站起。

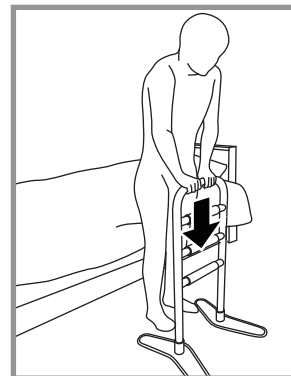


⚠ 注意 ●請務必朝下方向施力。


使用方法

■從棉被中站起

1 將身體側躺

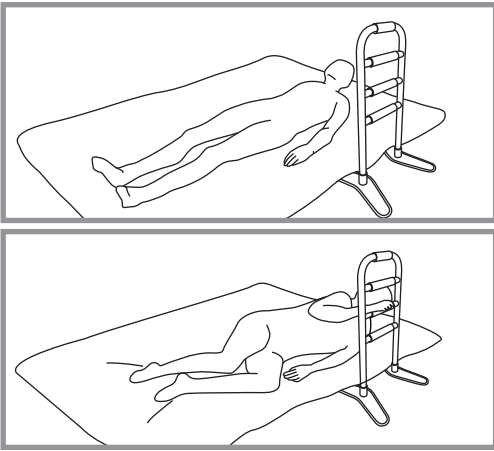


2 手撐住扶手，將上半身抬起。

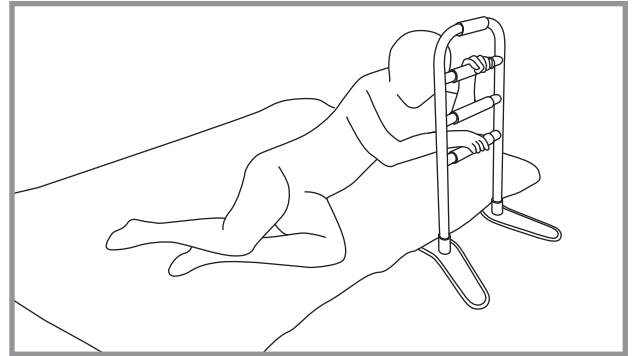


⚠ 注意 ●請勿將扶手拉近身邊。

3 將膝蓋跪在地板上坐著。

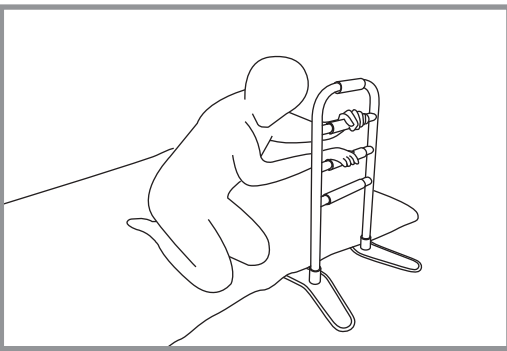


4 將扶手移動至容易站起的位置、方向。


(例)將扶手移動至容易站起的位置。
如正面朝向身體、側面、右邊或左邊。

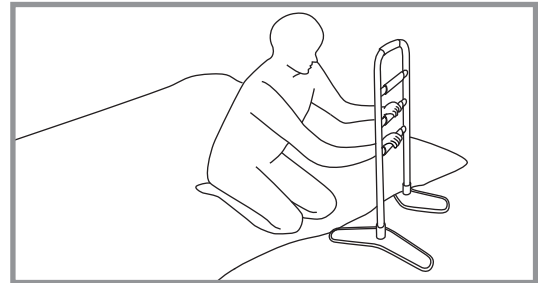

5 抓住握把，將腰部向上抬起， 上身稍微往前倒。

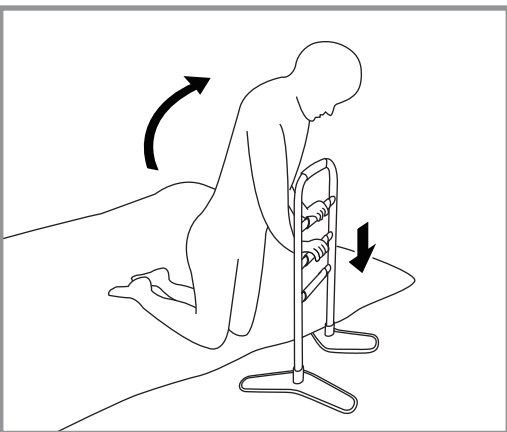

6 一邊將膝蓋抬起，一邊將把手往 下方向壓，站起。

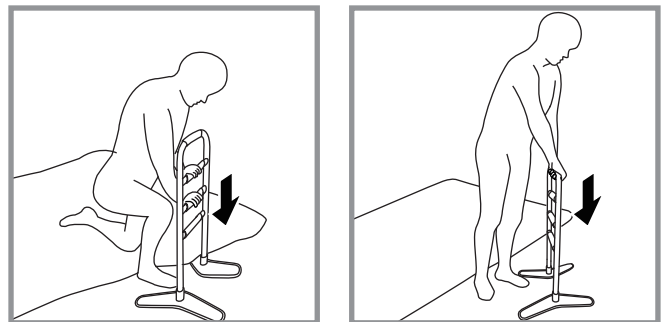


⚠ 注意 ●請務必朝下方向施力。

⚠ 注意 ●請勿在棉被的上方站起，可能會有跌倒的風險。

使用方法


■從椅子或沙發站起

- 1** 一邊抓緊扶手，一邊將腰靠向椅子或沙發的邊緣。

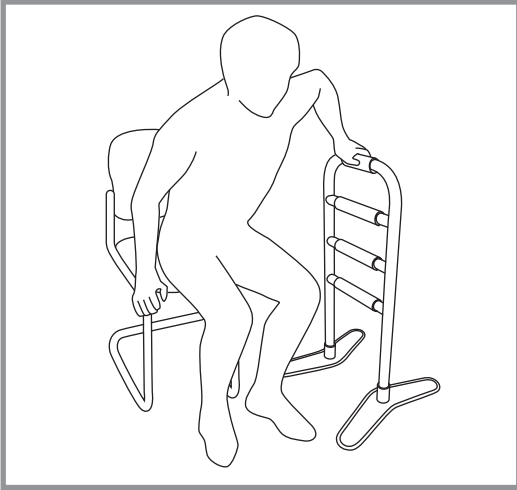


- 2** 將扶手移動至容易站起的位置、方向。



(例) 將扶手移動至容易站起的位置。
如正面朝向身體、側面、右邊或左邊。

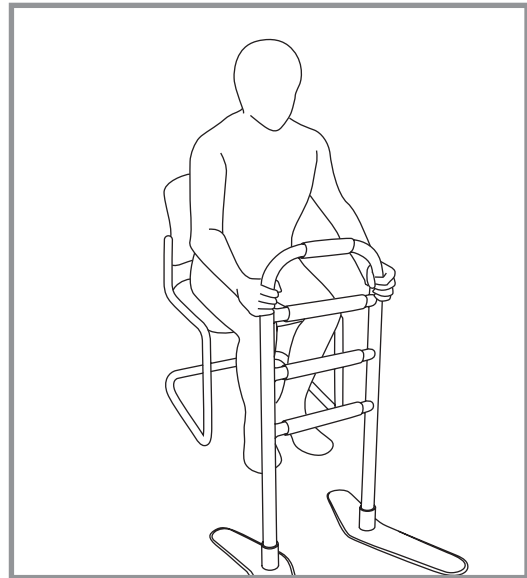

- 3** 抓住握把，將腰部向上抬起，上身稍微往前倒。

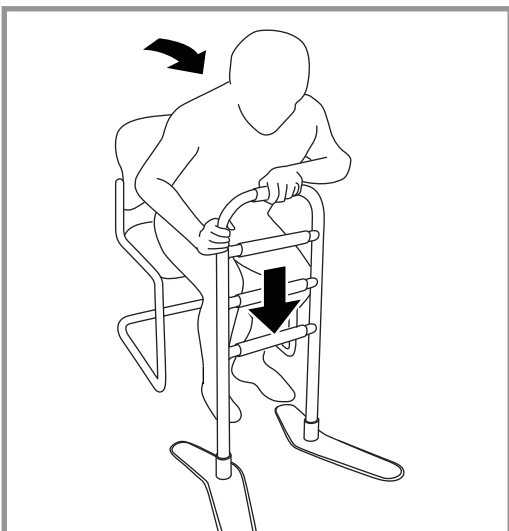

- 4** 請一邊往下方向壓住扶手，一邊站起。

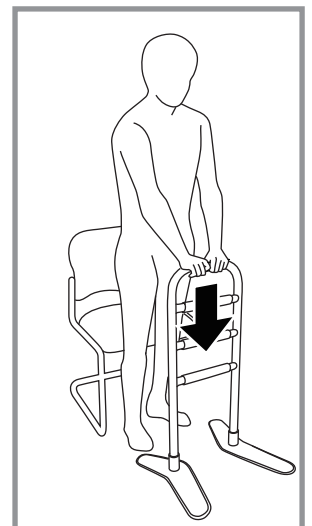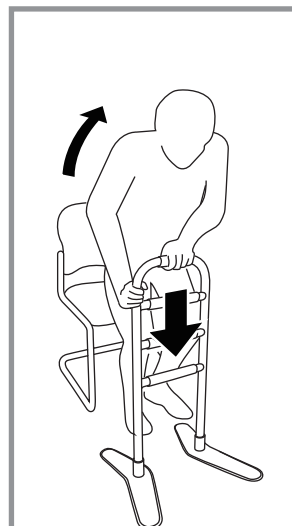


⚠ 注意 ●請務必朝下方向施力。


使用方法

■從椅子或沙發站起

- 1 一邊抓住扶手，一邊移動至床的旁邊。

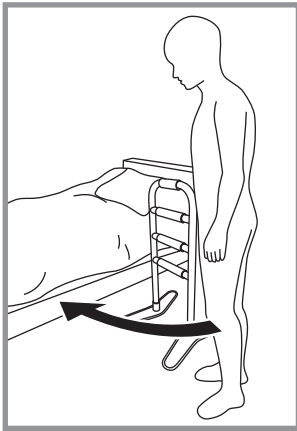

- 2 一邊將握把往下方向壓，一邊緩緩坐在床鋪的邊緣。

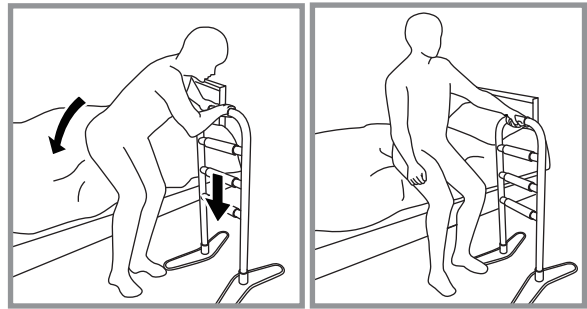

⚠ 注意


- 請務必往下方向壓住扶手

■坐在床上的情況

- 1 一邊抓緊扶手，一邊移動。



- 2 將握把往下壓後，一邊將單側膝蓋緩緩放在地板。再將另一邊的膝蓋放在地板後坐下。

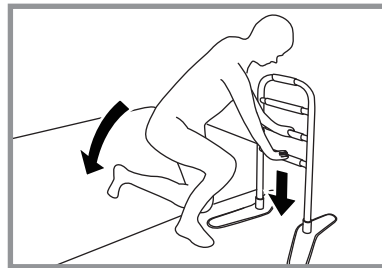


⚠ 注意


- 請務必往下方向壓住扶手

■坐在椅子或沙發的情況

- 1 一邊抓住扶手，一邊移動至椅子或沙發

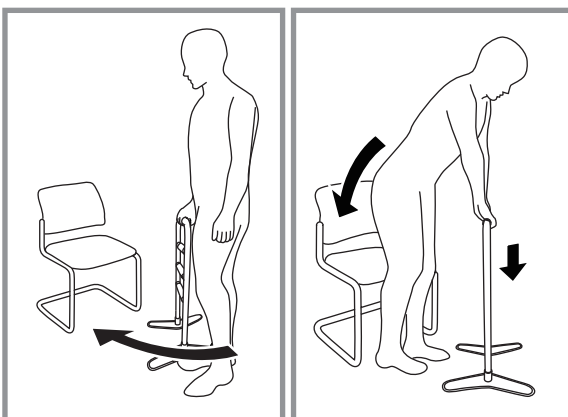

- 2 一邊將握把往下方向壓，一邊緩緩坐在椅子或沙發的邊緣

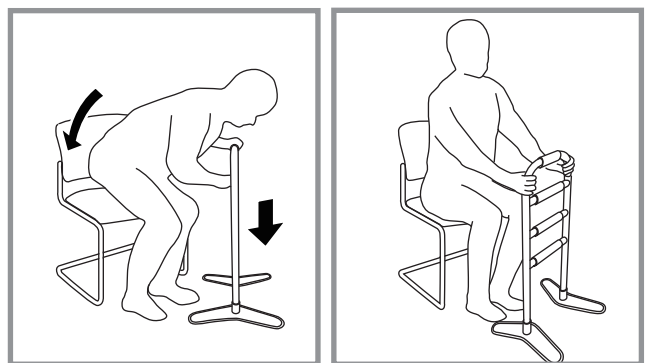

⚠ 注意

- 請務必將產品往下方向壓