


此產品為購物時，放置物品的購物車。雖然設計可支撐身體的重量，但不適用於無法自行走路的人士或是需有旁人輔助才能行走的人士。請勿當成助行器、助步車使用。

感謝您購買本公司的產品。為了能夠安全使用本產品，使用前請務必閱讀此使用說明書。此外，閱讀完，請妥善保管說明書。若使用上對本產品有任何不清楚的地方，請直接聯繫購買商家或是本公司客服部。

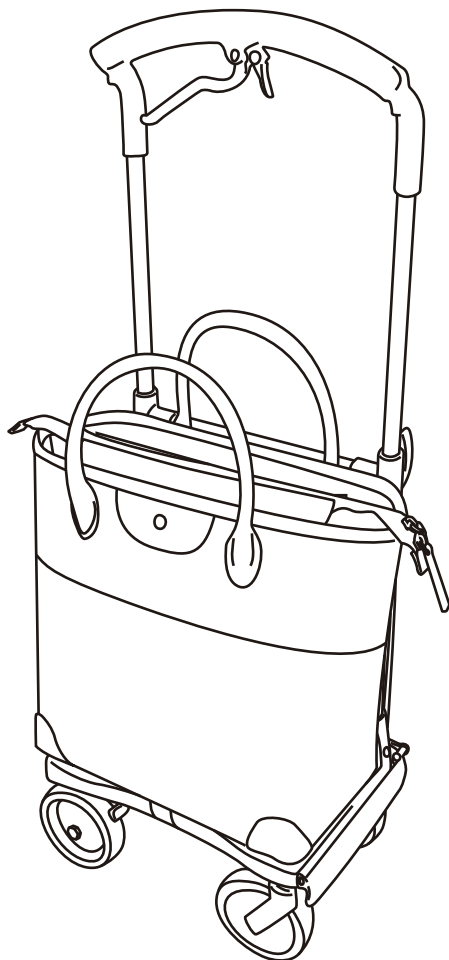

### 目錄

使用前注意事項	1P
使用注意事項	1~3P
清潔維護	3P
保管方法	3P
各部位名稱及規格	4P
行進方法	5P
煞車使用方法	5~6P
握把高度調節	6P
前滾輪切換方法	7P
袋子的安裝、取下	8P
煞車調節方法	9~10P

福祉用具綜合廠家

 株式会社 幸和製作所

製造商名稱: 幸和製作所株式会社

製造商地址: 日本大阪府堺市區海山町3丁159番地 1

總代理  杏豐實業股份有限公司  
SUN•UP HEALTH CARE CO., LTD.

[www.sunup-hc.com.tw](http://www.sunup-hc.com.tw)

新北市三重區重新路五段609巷10號4樓

電話: (02)6635-8858

為了防止摔落及意外的發生，請務必遵守下列事項。

## 使用前注意事項

下列人士請勿使用。



### 警告

錯誤的使用方法可能導致人員死亡或重傷，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 需要拐杖才能步行的人。(須抓著扶手才能步行的人士，須照護者攙扶才能步行的人士。)
- 復健期間，需要倚靠輔具才能步行的人。



### 注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 調整高度及取下袋子時，請確認周圍是否有人。
- 請確實調整高度及安裝袋子。此外，請小心不要夾到手指。
- 使用前，請檢查各部位。
- 請檢查各部位的金屬零件（壓膠鉚釘，螺絲，螺母等）是否會鬆動。
- 請確認握把確實固定。若無確實固定，握把的高度將於使用時改變，容易發生危險。
- 請確實檢查各部位，特別是手煞車與停車煞車，請確認左右後輪可確實固定。

## 使用注意事項



### 警告

錯誤的使用方法可能導致人員死亡或重傷，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 請勿將行李掛在握把，容易失去平衡發生危險。
- 請勿奔跑使用本產品，可能跌倒發生危險。
- 本產品有分前後行進方向，請務必以前滾輪設定的方向行進，若於往後行進方向前進時，可能造成跌倒。
- 握住手煞車或是停車煞車時，請勿再前進。
- 離開車子時，請務必將車子鎖上停車煞車，此外，請勿將產品放在緊急出口 / 滅火器 / 滅火栓前。
- 本產品煞車構造與汽車不同，請勿過度倚賴。
- 請勿停車於斜坡上。即使於斜坡鎖住煞車也有可能移動，非常危險。不得已時，請特別注意購物車有無滑動。
- 經過平交道路口、高低落差時，請小心前輪不要被卡住。



## 注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 通過斜坡、溝槽、高低落差的地方，請特別小心。  
經過高低落差地方時請筆直地進入。通過高低落差前，請先暫停一下，並小心經過。
- 經過高低落差時，若購物車內有物品，強行拉動購物車的話，可能造成車輪、支架破損。
- 上下樓梯時，請勿拉動購物車。
- 請勿將8kg以上的重物放入袋內。
- 請將重物放置於袋子下方。
- 本產品無法橫向移動，若須橫向移動時，請搬起車體移動。
- 請勿將物品集中於單邊袋子，可能造成車體失去平衡，導致翻覆。
- 風雨強勁的時候，請勿使用。
- 請勿將本產品當成助步車、椅子、腳踏墊使用或是乘坐於上。
- 除了本公司的維修人員外，請勿自行拆解、維修。
- 請小心不要夾到手指頭。
- 支撐身體時，請對抓握的手垂直增加體重，傾斜的話容易跌倒。
- 請勿施加過多力量於握把，過多的重量可能造成變形、破損、跌倒。
- 請遵守最大使用者重量。
- 請勿於斜坡、不平坦的地方使用本產品支撐身體，容易造成跌倒。





## 注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 因路面狀況的不同，可能有跌倒的危險。請務必小心。
- 起立坐下時，請勿使用本產品握把。
- 若欲攜帶至飛機上，請遵照航空公司的規則。
- 請勿將小刀等尖銳物品放置於內。


## 清潔維護

- 若本體支架被雨水淋濕時，請用乾布擦乾。若有泥土，灰塵時，用沾水抹布擦乾淨後，用乾布擦乾。
- 若袋子弄髒時，用沾水抹布擦乾淨後，用乾布擦乾。
- 請勿使用漂白水、去漬油、甲酚等揮發性液體擦拭。否則，可能導致塑膠惡化、破損。

## 保管方法

- 請保管於屋內。長期不使用時，請清潔後保管。
- 請勿保存於雨水潑濺或高溫潮濕處。可能導致故障、變形。

## 各部位名稱及規格

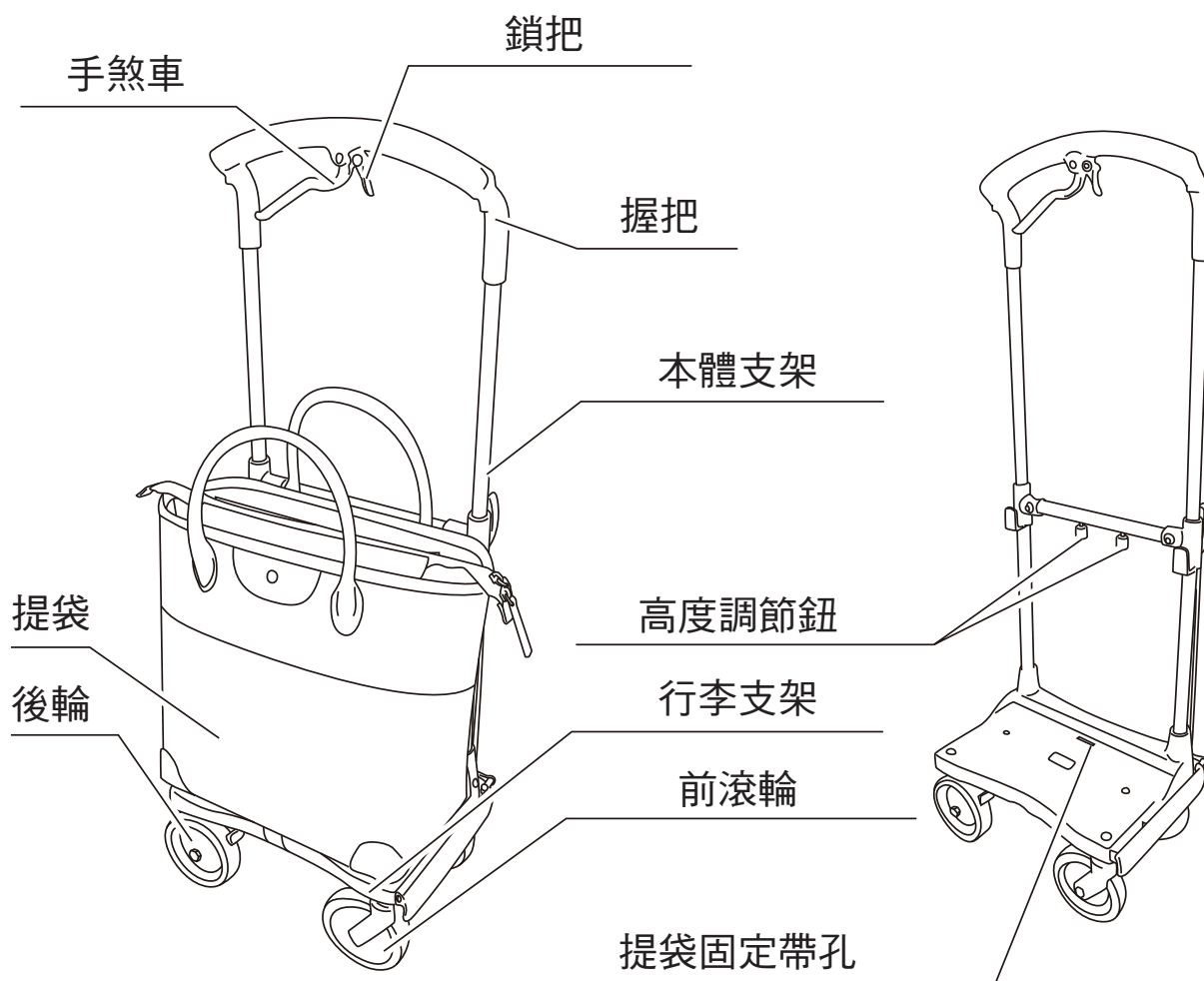


組裝尺寸	寬345 X 長215 X 高 675~860 mm		
握把高度	高675~860 mm (5段)		
本體材質	鋁	車輪材質	EVA樹脂
袋子尺寸	寬400X 長160 X 高330 mm		
重量	2.7 kg		
袋子材質	尼龍	最大乘載重量	8kg
最大使用者體重	80kg	最大握把耐重	40kg

\*尺寸、重量為參考數值

## 行進方法

請握住握把後方。請依照握把內側的箭頭方向前進。

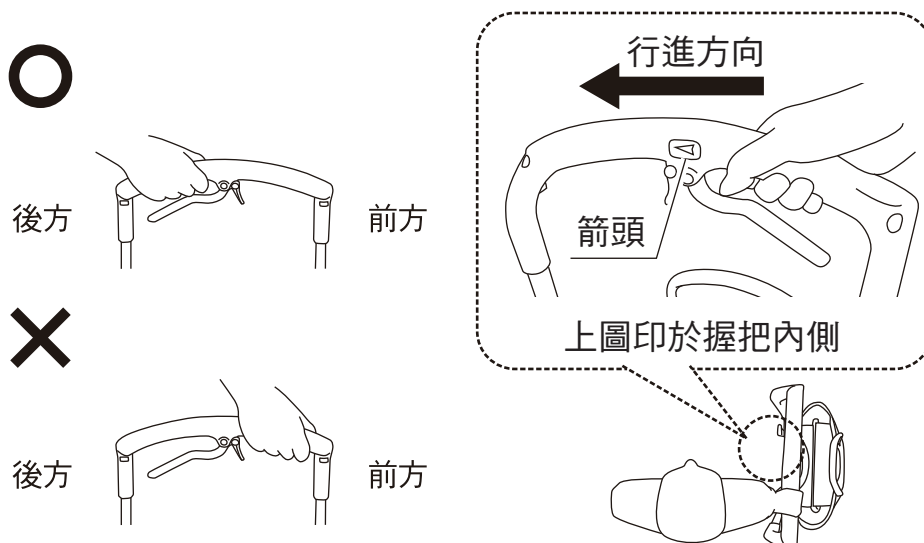


### ⚠ 注意

右側型產品請用右手。(上圖為右側型產品)不得已須用左手使用時，請特別注意小心。

## 煞車使用方法

<手煞車的使用方法> 握把與手煞車一起握緊時，鎖住手煞車。放鬆手指即解除煞車。

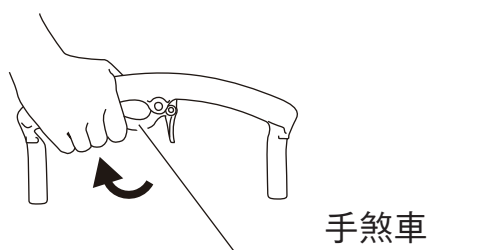

## 煞車使用方法

### <停車煞車的使用方法>

#### 鎖住停車煞車

握住手煞車時，拉住鎖把即停車。



#### 解除停車煞車

握住手煞車時，將鎖把往行進方向壓下即解除停車煞車。

### ! 注意

- 離開車子時，請務必將車子鎖上停車煞車。確認左右後輪可確實固定。
- 請注意不要夾到手指。

## 把手高度調節

將高度調節鈕往內壓著，上下移動把手，調節至適合的高度。

將高度調節鈕放開，確認本體左右側高度是否確實固定。








### ! 注意

- 把手下降時，請勿施加重量。可能造成不平衡，發生跌倒。
- 確認扶手確實固定再使用。
- 請注意不要夾到手指。
- 務必使本體支架左右兩側高度調至相同高度。
- 使用時，確認高度調節鈕固定於鎖定的位置。

## 前滾輪切換方法

前滾輪的行進角度，可根據喜好調整至「固定直行模式」或「360度活動模式」兩種。欲使用固定直行時，請拉起切換把手，欲使用360度活動模式時，請壓下切換把手。

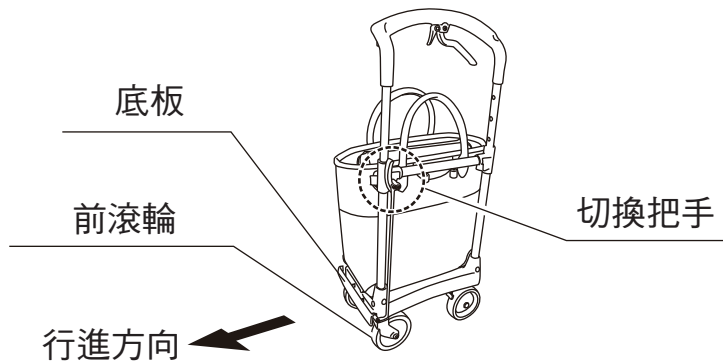

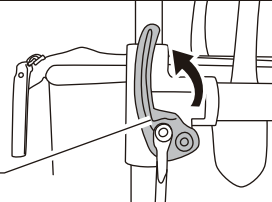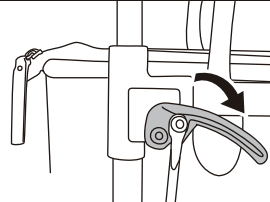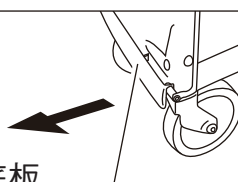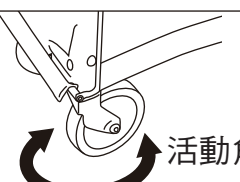
固定直行		360度活動	
背面圖		背面圖	
切換把手	將切換把手拉起，即固定滾輪，前進方向為固定直行。	將切換把手壓下，即解除滾輪固定，前進方向為360度活動。	
	固定直行		活動角度360度
底板			

### ⚠ 注意


固定直行時，請確認前滾輪確實固定於底板。  
切換把手拉起時，底板略為下降的狀態，此時，將車體略往前行，前滾輪即可固定直行。

## 袋子的安裝 · 取下


### <取下方法>

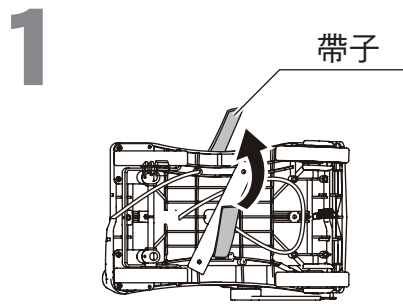

解開行李支架內側帶子的魔鬼氈。

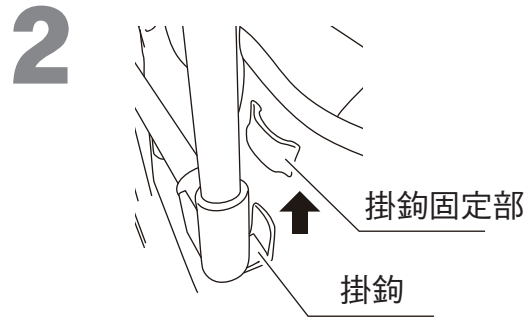


從本體支架的掛鉤上取下袋子背面的掛鉤固定部分。

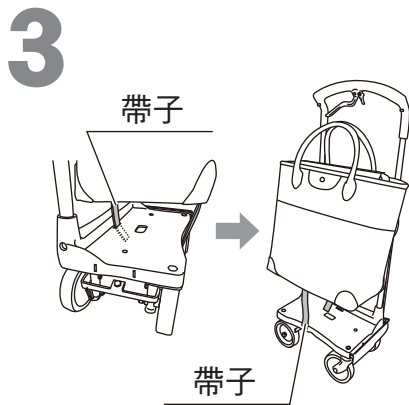

袋子下方的帶子可從行李支架脫出。


### <安裝方法>

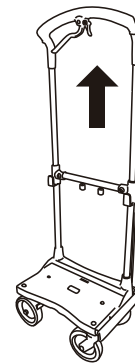

安裝袋子時，請在握把升高的狀態下進行。  
步驟與取下時順序相反。


## ⚠ 注意

- 安裝袋子時，請確認袋子確實安裝後再使用。
- 請注意不要夾到手指。
- 安裝時，請務必將煞車線上方置於袋子之上。

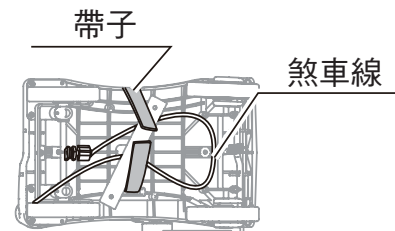

## 煞車調節方法

- 1 請先解除煞車。
- 2 將行李支架內的六角螺帽1向逆時鐘方向轉鬆。
- 3 轉動外部螺絲，調整後輪與煞車片的間隙至4-5mm。  
順時鐘轉動 → 間隙變寬  
逆時鐘轉動 → 間隙變窄
- 4 固定外部螺絲，將六角螺帽1順時鐘轉動鎖緊。(六角螺帽鎖緊時，如果外部螺絲轉動，表示步驟3所調節的鬆緊移位。)

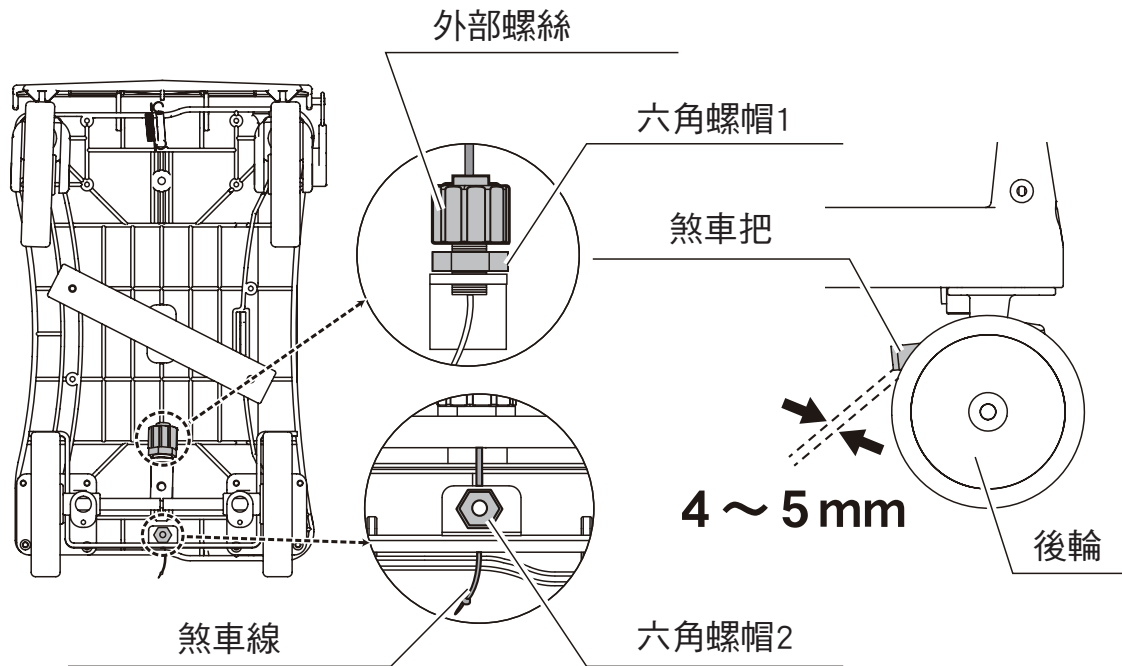


## 煞車調節方法

### ■依照上面的步驟仍無法調整煞車力道時

將煞車把內側的六角螺帽2以逆時鐘方向轉鬆，用尖嘴鉗等將煞車線拉出，調整後輪跟煞車片距離4~5mm。再將六角螺帽2以順時鐘方式轉緊。

※此調節方法僅適用於外部螺絲無法調整時。日常的微調整，請參考9P煞車調節方法。

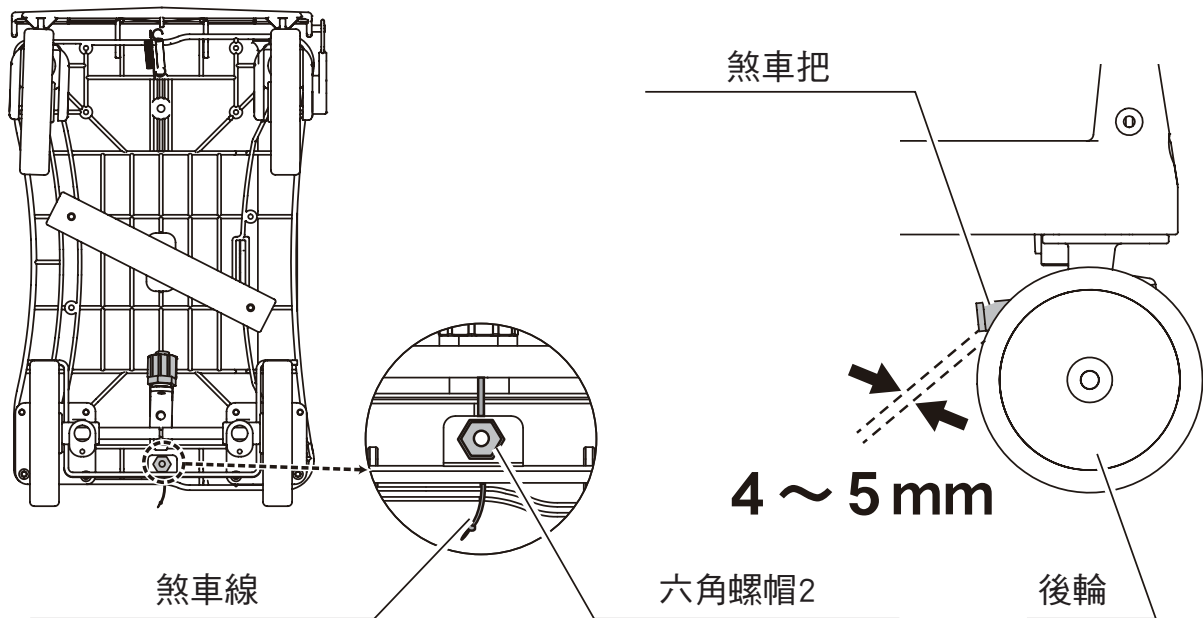

# 杏豐實業股份有限公司-幸和製作所 TacaoF 商品保證基準

- ① 本產品的品質保證期是從購買日起 6 個月以內。
- ② 保證期間內故障免費修理，須維修時，請洽所購買的販賣店。
- ③ 保證書遺失不再補發，請妥善保管。
- ④ 故障時，請勿自行拆修或交予非本公司之技術人員檢修，以免造成更嚴重的損壞。
- ⑤ 在下列情況下，保證期內也會收取費用。
  - 不在台灣地區
  - 保證書上沒有消費者姓名、購買日期、所購買的販賣簽章或上述內容修改
  - 使用不當，自行修理或改造，所發生故障或損壞的情況
  - 天災地變，事故或掉落所產生的故障或損傷
  - 消耗品的劣化、損傷或污損
  - 實際修理所發生的必要運費及維修人員交通費。
- ⑥ 本保證書限在台灣地區有效，若為離島，需自行負擔運費或(及)維修人員交通費。
- ⑦ 保證期間後，如有故障、檢修情況酌收零件費，必要運費及維修人員交通費。

## 保 證 書

請詳細填寫

商品名稱: TacaoF 購物行李車	姓名:
商品型號: KWCC04	電話:
購買日期:	地址:
保證期限: 購買日起 6 個月	
經銷商蓋章:	備註:

蒙惠顧，謹致由衷謝意，為確保您的權益，請務必要求經銷商販賣店填寫購買日期並蓋店章，始能享有本公司完善的保證服務

若發現產品破損、異常時，請立即停止使用，並聯繫零售商或者本公司客服部  
以免造成嚴重的事故。

※轉讓本產品時，請務必一併轉讓本使用說明書。