


本產品適用於購物，行李搬運。
不適用於藉由固定扶手類的物體才能行走或藉助照護者在旁協助行走的人。
請勿將本產品作為助步器使用。

感謝您購買本公司的產品。為了能夠安全使用本產品，請在使用前務必閱讀此操作說明書。此外，閱讀完後請妥善保管說明書。如果使用上對本產品有不清楚的地方，請直接聯繫購買商家或是本公司客服部。

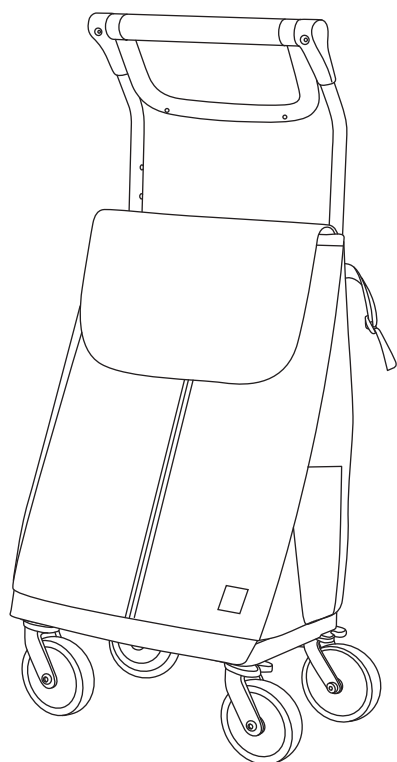

目 錄

使用前注意事項	1P
使用時注意事項	2-4P
清潔維護	4P
保管方法	4P
各部的名稱及規格	5P
行走方法	6P
握把高度調節方法	7P
袋子的安裝及取下方式	8-9P
掛鉤的使用方法	9P
傘架的使用方法	10P

福祉用具綜合廠家

 株式会社 幸和製作所

製造商名稱: 幸和製作所株式社

製造商地址: 日本大阪府堺市區海山町3丁159番地 1

總代理  杏豐實業股份有限公司
SUN•UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw

新北市三重區重新路五段609巷10號4樓
電話: (02)6635-8858

為了防止摔落及意外的發生，請務必遵守下列事項

使用前注意事項

下列人士請勿使用



警告

錯誤的使用方法可能導致人員死亡或重傷，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 需要拐杖才能步行的人。(要抓著扶手才能步行的人，要照護者扶著才能步行的人。)
- 康復期間，需要倚靠輔具才能步行的人



注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項

- 調整高度及拆裝袋子時，請確認周圍是否有人。
- 請確實調整高度及拆裝袋子。此外，請小心別夾到手指。
- 使用前，請檢查各部位。
- 請檢查各部位的固定夾具（壓膠鉚釘、螺絲、螺母等）是否會鬆動。
- 請確認握把確實固定。若無固定，使用時，握把的高度會改變，容易發生危險。
- 請確認輪胎無磨損。若磨損的話，請更換輪胎。
需要更換輪胎時，請與銷售店家或本公司客服中心聯繫。

使用時注意事項



警告

錯誤的使用方法可能導致人員死亡或重傷，為避免此狀況，請務必遵守下列事項。

- 該產品要適當地推、拉。若使用方法錯誤，可能會跌倒。
- 請勿將行李掛在橫推握把，拉手握把上。
- 請勿奔跑著使用該產品，可能會跌倒，發生事故。
- 請勿將該產品放在緊急出口、滅火器、消防栓前。
- 經過鐵路道口，高低差時，請小心車輪卡住。
- 請勿將身體倚靠在握把，可能會跌倒。



注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項

- 使用時通過斜坡、溝、高低差的地方，請特別小心。
經過高低差時請勿斜著進入。在高低落差前，請先停一下，並小心經過。
- 經過高低落差時，若內有行李，拉引該產品的話，可能造成車輪、支架破損。
- 上下樓梯時，請勿拉引本體。
- 請勿將10kg以上的重物放入袋內。
- 請將重物放置於袋子下方。
- 將行李集中於袋子一側時，可能造成車體失衡，導致翻覆。

使用時注意事項




注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項

- 請勿於強風豪雨時使用本產品。
- 請勿將本產品作為助步車，椅子，踏墊，載人等用途。
- 除了本公司職員以外，請勿自行拆解，修理。
- 請小心別夾到手指。
- 別勿過度施力於橫推握把和拉手握把，若過度負重，產品容易變形、破損。
- 請確認左右握把的高度一致。
- 請勿超過握把可動範圍轉動。附圖
- 請勿用拉手握把提起本體。
- 請注意路面狀態，小心跌倒。
- 坐下站起時，請勿將該產品做為扶手使用。
- 內有行李時，請勿搭載於賣場購物車。
- 該產品攜帶進飛機時，請遵守航空公司的指示。
- 請勿將刀等鋒利物品放入產品內。
- 袋子的顏色可能會轉移到衣服、物品上。
- 袋子因水、汗、摩擦，多少會有掉色的情形。
- 袋子因長時間被太陽照射，會有變色、褪色的情形。

拉手握把
可動範圍

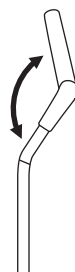

使用時注意事項



注意

錯誤的使用方法可能導致人員受傷或者是產品損壞，為避免此狀況，請務必遵守下列事項

- 內容物較重時，請勿用力提起蓋、口袋等荷重部分，可能導致破損。
- 本產品無保冷功能。
- 該產品無防水功能。請勿將冰或液體直接放入。
- 請勿於陽光直射之處、高溫處使用。


清潔維護

- 若本體支架被雨水淋濕時，請用乾布擦乾。
若有泥土，灰塵時，用沾水抹布擦乾淨後，用乾布擦乾。
- 若袋子被雨水淋濕時，用柔軟乾布擦乾，陰乾。
- 若袋子弄髒時，用沾水抹布擦乾淨後，用乾布擦乾。
- 請勿使用漂白水、去漬油、甲酚等揮發性液體擦拭。
否則，可能導致塑膠惡化，破損。

保管方法

- 請保管於屋內。長期不使用時，請清潔後保管。
- 請勿保存於雨水潑濺處，此外，也請勿保存於高溫潮濕處。
否則，可能導致故障、變形。
- 為防止染色到其他物品，請勿將塑膠袋，皮製品密封保管。

各部的名稱及產品規格

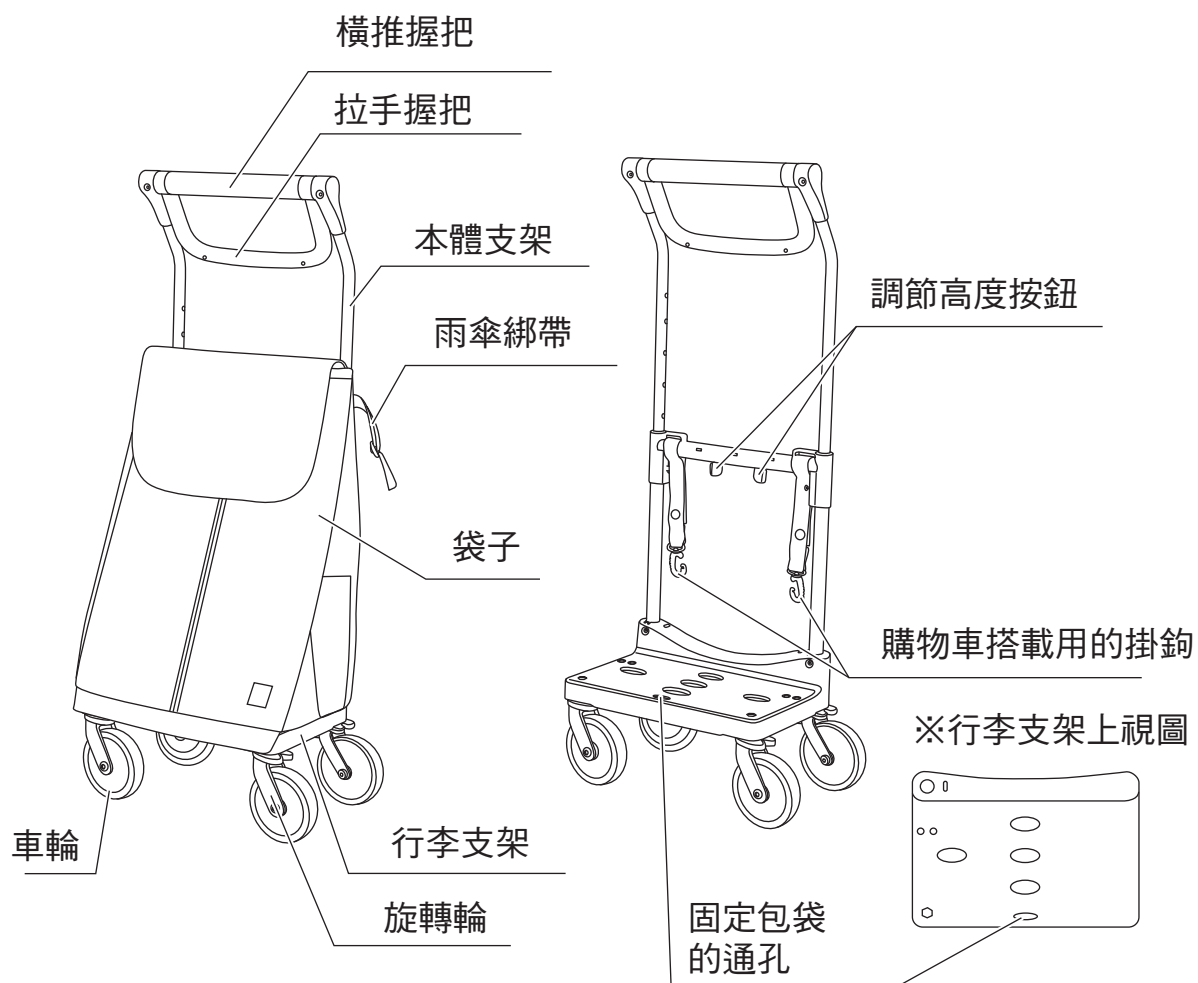


【本體支架規格】

組裝尺寸	寬320 x 長225 x 高 705~890mm
握把高	高 705~890mm (5段)
本體材質	鋁合金
袋子材質	聚酯纖維
袋子尺寸	寬330 x 長185 x 高520mm
車輪材質	EVA樹脂
最大耐荷重	10kg


※各尺寸、重量為參考值。

行走方法

4輪行走使用時，橫推握把
請握於中心附近。

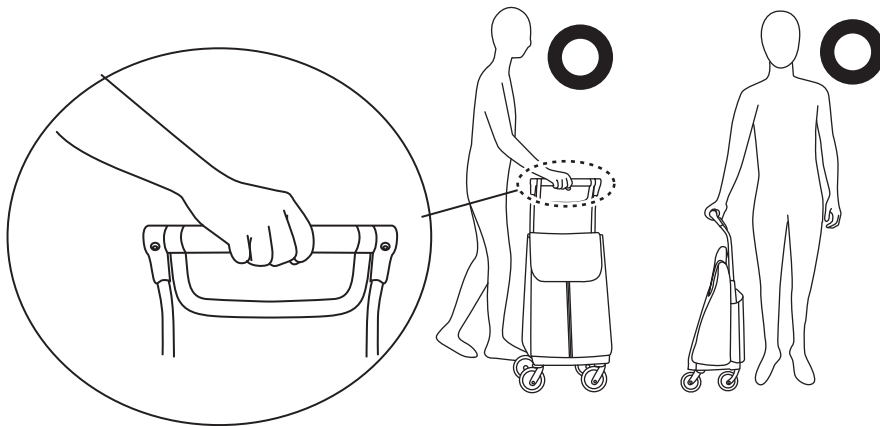


2輪行走使用時，拉手握把
請按箭頭方向拉。

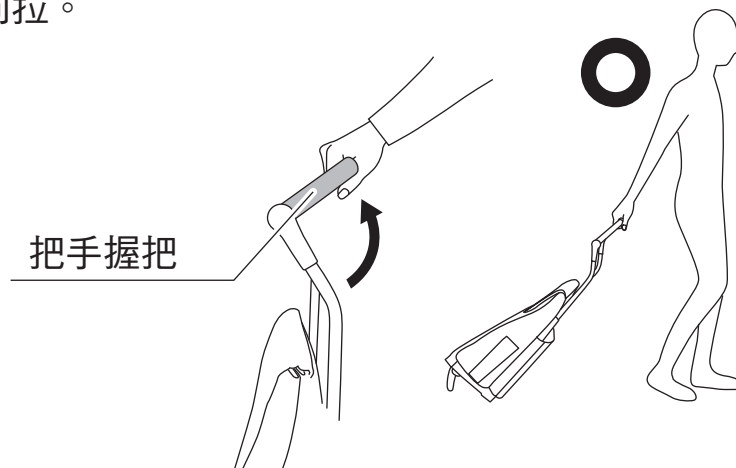


! 注意

- 體重過於倚靠握把時，可能會跌倒。
請勿過於倚靠握把。
- 請勿將行李掛在橫推握把、拉握把上。
- 請勿僅以握把舉起本體。
- 請小心別夾到手指。
- 使用橫推握把時，請將拉手握把要完全垂下。
- 使用橫推握把時，請注意車體必須在側身，
往行進方向推動。

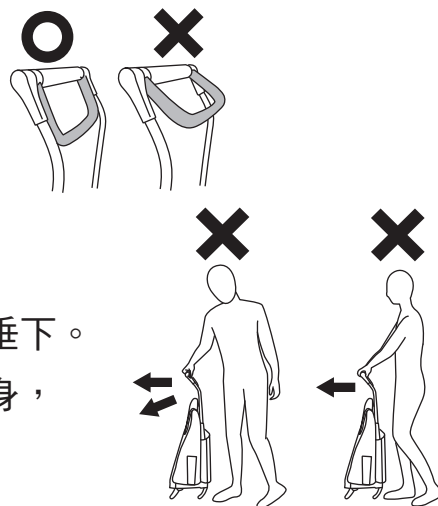

握把高度調節方法

將調節高度的按鈕往內側按壓，使握把上下移動，請在適當的高度鬆開。按鈕往外開，確認左右本體支架是否固定。

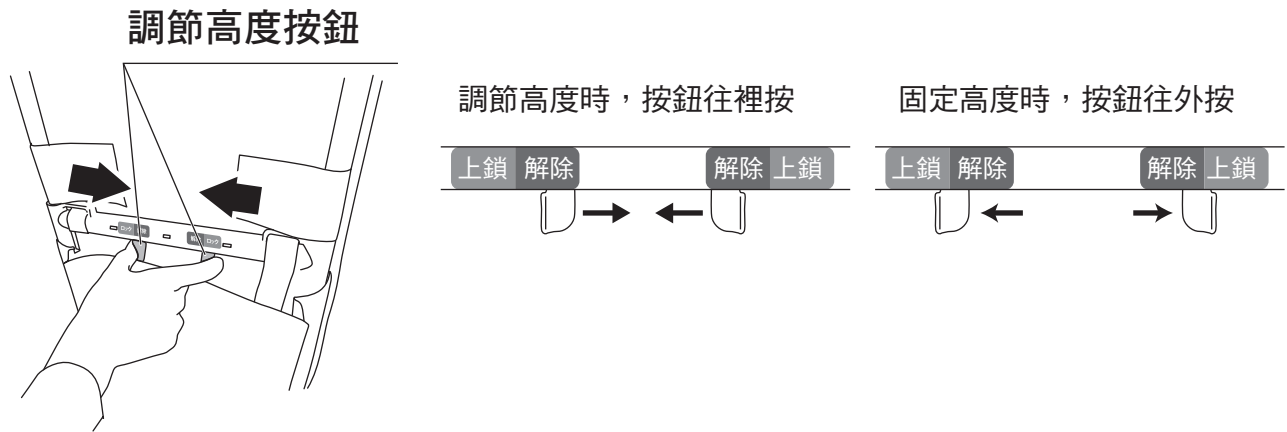

⚠ 注意

- 體重過於倚靠握把時，可能會失去平衡。請勿過於倚靠把手。
- 請確認握把確定固定後，再開始使用。
- 請注意別夾到手指。
- 請務必確認本體支架的左右高度在同一位置。
- 使用時，請確認調節按鈕在LOCK上鎖的位置。
- 請別太用力拉握把、推本體。
- 請調整握把的高度至【本體支架規格】的範圍內使用。

袋子的安裝及取下方法

【安裝方法】


1



支架安裝孔

請將握把穿過袋子後方的支架安裝孔。


2

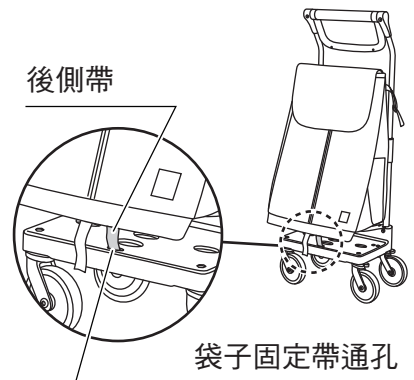

後側帶

請將袋子下方後側帶子穿過袋子固定帶通孔。


3

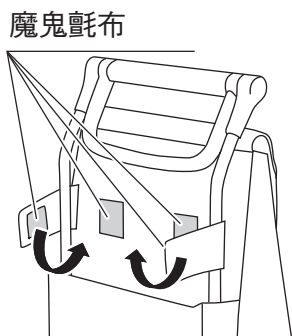

固定

將袋子背面安裝於本體支架上，用魔鬼氈固定袋子。

4

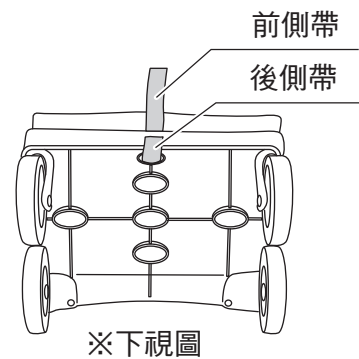

用行李底座內側的前側帶和後側帶的拉鍊固定袋子。

【取下袋子方法】


取下袋子時，請按照安裝方法相反順序進行操作。

⚠ 注意

- 安裝袋子時，請確認確實安裝後再使用。
- 請小心別夾到手指。


⚠ 注意

- 行李必須放入（前方的）口袋。
不能放入支架安裝孔。

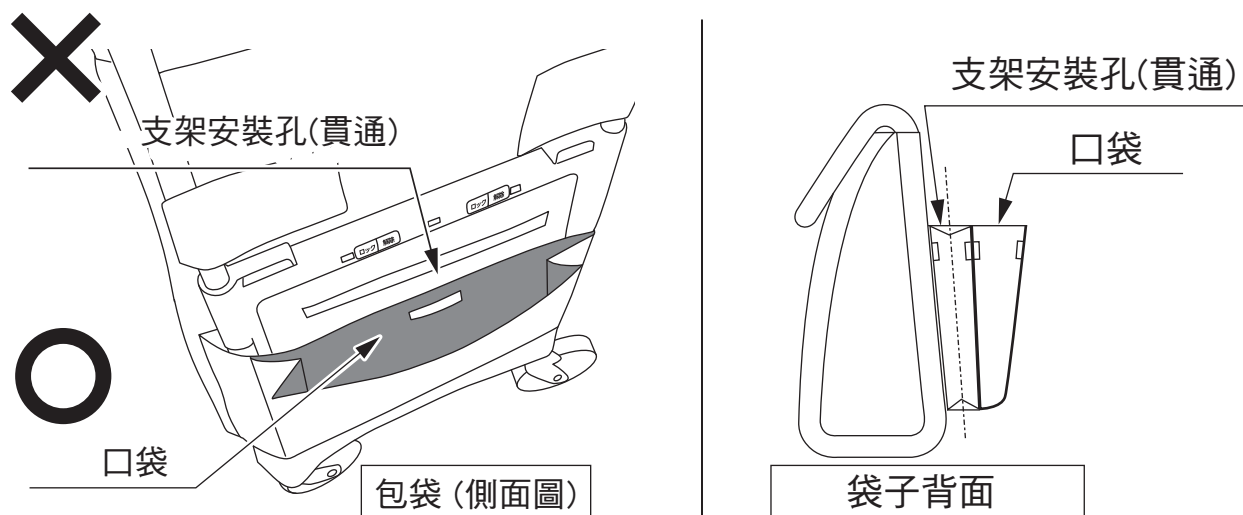

掛鉤的使用方法

可將2個掛鉤掛在賣場的購物車上。
※一部分的購物車不能使用。

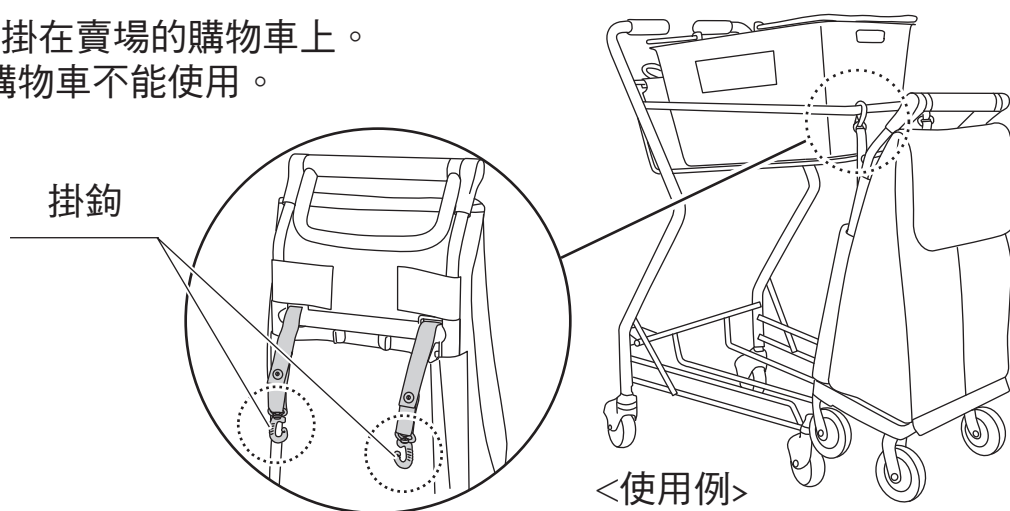


⚠ 注意

- 有行李時，請勿搭載在購物車上。
- 請確認購物車能承受掛鉤的重量後，請將2個掛鉤同時掛上使用。
- 請小心別夾到手指。
- 掛鉤搭載在購物車時，產品會晃動。請小心使用。

傘架的使用方法

請用袋子附的傘帶固定雨傘，再放入傘架袋內。

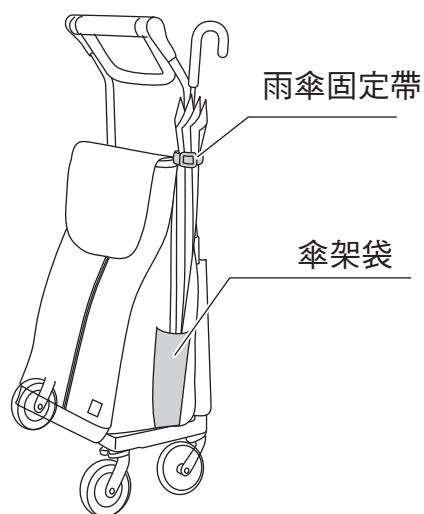

! 注意

- 請確認雨傘確實固定。
若雨傘無確實固定，使用時，雨傘可能會脫落發生危險。
- 若使用較重的雨傘，車體可能會翻覆。
- 淋濕的雨傘直接放入傘架，可能會造成布料變色。
- 雨傘的尖端較為鋒利時，可能會造成傘架袋破裂。

杏豐實業股份有限公司-幸和製作所 TacaoF 商品保證基準

- ① 本產品的品質保證期是從購買日起 6 個月以內。
- ② 保證期間內故障免費修理，須維修時，請洽所購買的販賣店。
- ③ 保證書遺失不再補發，請妥善保管。
- ④ 故障時，請勿自行拆修或交予非本公司之技術人員檢修，以免造成更嚴重的損壞。
- ⑤ 在下列情況下，保證期內也會收取費用。
 - 不在台灣地區
 - 保證書上沒有消費者姓名、購買日期、所購買的販賣簽章或上述內容修改
 - 使用不當，自行修理或改造，所發生故障或損壞的情況
 - 天災地變，事故或掉落所產生的故障或損傷
 - 消耗品的劣化、損傷或污損
 - 實際修理所發生的必要運費及維修人員交通費。
- ⑥ 本保證書限在台灣地區有效，若為離島，需自行負擔運費或(及)維修人員交通費。
- ⑦ 保證期間後，如有故障、檢修情況酌收零件費，必要運費及維修人員交通費。

保證書

請詳細填寫

商品名稱: TacaoF 購物行李車	姓名:
商品型號: KWCC09	電話:
購買日期:	地址:
保證期限: 購買日起 6 個月	
經銷商蓋章:	備註:

蒙惠顧，謹致由衷謝意，為確保您的權益，請務必要求經銷商販賣店填寫購買日期並蓋店章，始能享有本公司完善的保證服務

若發現產品破損、異常時，請立即停止使用，並聯繫零售商或者本公司客服部
以免造成嚴重的事故。

※轉讓本產品時，請務必一併轉讓本使用說明書。